

Sicher und einfach
Zentimeter verlieren!



Wie funktioniert der TC CONTRAST?

Der TC CONTRAST wechselt schnell (innerhalb von 6 Sekunden!) zwischen Temperaturen von 6 bis 41 Grad Celsius, und kann mit verschiedenen voreingestellten Programmen vollautomatisch und auch völlig sicher eingerichtet werden. Diese heißen und kalten Temperaturen werden über Flüssigkeit durch die weichen Wraps gepumpt und so auch schnell und intensiv auf den Körper übertragen. Das erste Mal, dass der Kunde die 6 Grad Celsius erlebt, fühlt es sich sicher erst einmal kalt an, aber man gewöhnt sich innerhalb weniger Minuten daran, wonach sich der Kunde entspannen kann.



Lokalisiertes Abnehmen mit TC CONTRAST

Die Dicke der subkutanen Fettschicht kann durch gesunde Ernährung und Bewegung durch die Verbrennung von braunem Fett reduziert werden. Der Körper speichert jedoch auch überschüssige Energie in Form von weißem Fett, das nur verbrannt werden kann, wenn es in braunes Fett umgewandelt wurde. Der TC CONTRAST bietet die Lösung mit 3 wichtigen Ansatzpunkten:

- 1** Mit dem TC CONTRAST kühlen wir die gesamte Zone inklusive des darunter liegenden Fett- und Muskelgewebes auf 6 °C ab. Die Muskeln wollen den Körper auf Temperatur halten (37 °C) und beginnen damit, Wärme zu produzieren. Diese Wärme entsteht, weil die Muskeln ein körpereigenes Hormon (Irisin) absondern, das die Verbrennung von braunem Fett auslöst. So nimmt das Volumen des vorhandenen braunen Fettes bereits ab.
- 2** Das gleiche Hormon Irisin hemmt auch die Produktion neuer weißer Fettzellen. Infolgedessen hat die Behandlung eine viel länger anhaltende Wirkung, und es ist auch viel einfacher, das erzielte Ergebnis aufrechtzuerhalten.
- 3** Ein sehr wichtiger Effekt der Kältezufuhr ist, dass die Leber auch ein körpereigenes Hormon namens FGF-21 produziert. Dieses Hormon hilft, das hartnäckige weiße Fett in braunes Fett umzuwandeln, das wiederum verbrannt werden kann. Dies ermöglicht es uns, die problematische weiße Fettschicht im Laufe der Behandlung anzugehen und die Körpergröße des behandelten Problembereichs zu reduzieren!




Warum führen wir dazwischen Wärme zu?

Nach mehr als fünfzehn Minuten Kälte geht der Körper in den „Isolationsmodus“, weil sich die Blutgefäße verengen. Somit nimmt auch die Wirkung der Kältezufuhr drastisch ab. Deshalb führen wir dazwischen blitzschnell Wärme zu (41 °C), so dass sich die Blutgefäße wieder aufweiten und der Isolationsmodus aufgehoben wird. So hat jeder nachfolgende Kältezyklus wieder optimale Ergebnisse!

Was macht den TC CONTRAST einzigartig?



Oberfläche: Der TC CONTRAST kann mehr als einen halben Quadratmeter gleichzeitig behandeln! Das ist nicht nur die größte Fläche auf dem Markt, sondern dank der 4 separaten, weichen Wraps auch die flexibelste Lösung aller Zeiten. Zum Beispiel können Sie gleichzeitig die gesamte Bauchzone, einschließlich der „Rettungsringe“, sowie beide Oberschenkel rundherum behandeln!

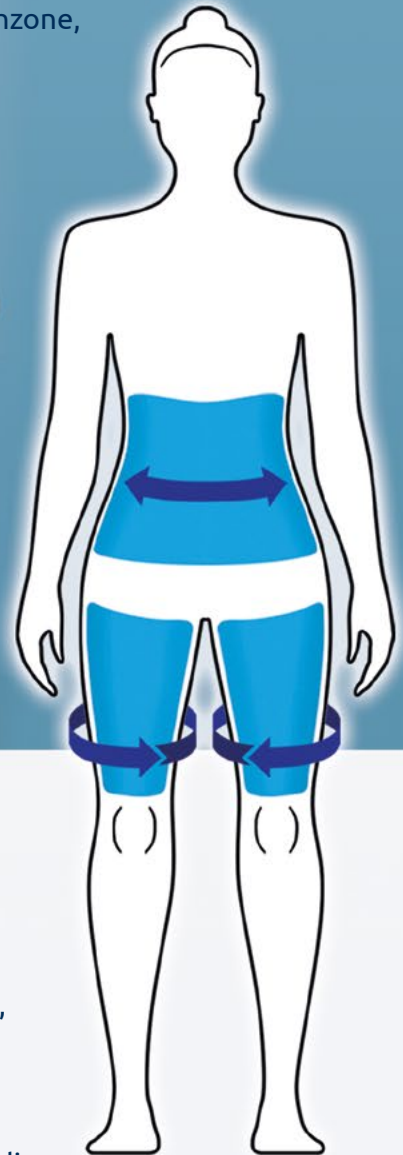

Doppelbehandlungen: Da der TC CONTRAST 2 separate Schläuche und 4 Wraps verwenden kann, ist dieses Kraftpaket auch ideal für die gleichzeitige Behandlung von 2 Personen. Stellen Sie die Maschine zwischen 2 Behandlungstühle und lassen Sie Freunde, Familie oder Partner die Behandlung gemeinsam genießen!



Sicherer und effektiver: Da der TC CONTRAST nie gefriert, ist dies nicht nur der sicherste Ersatz der Kryolipolyse, sondern erfordert auch keine Erholungsphase. Zudem sind wir durch das in der Zwischenzeit sehr schnelle Aufheizen bis zu 75 % effektiver als Gefriermethoden!




Benutzerfreundlich: Sobald Sie den Kunden verbunden haben, können Sie in der Zwischenzeit ganz unbesorgt etwas anderes machen, denn der TC CONTRAST erledigt seine Arbeit ganz automatisch! So müssen Sie keine ermüdenden manuellen Vorgänge durchführen. Und weil die Maschine so sicher ist, müssen Sie sie auch nicht ständig überwachen. Außerdem haben wir viel Zeit in die Benutzeroberfläche investiert, um Ihnen die Zeit zu sparen. Die Bedienung war noch nie so einfach!



Niederländische Fertigung und Service: Der TC CONTRAST wurde vollständig in den Niederlanden entwickelt und gebaut. Daher liegen die Expertise und der Service ebenfalls in der Nähe.

Welche Ergebnisse können Sie erzielen?

Für ein gutes Ergebnis empfehlen wir immer mehrere Behandlungen, mindestens jedoch 3. Wenn Sie ausschließlich das Gerät verwenden, können Sie bereits damit rechnen, dass im gewählten Bereich mehrere Zentimeter verschwinden. Wenn Sie sich aber auch während der Behandlungszeit für einen gesunden Lebensstil entscheiden, sind selbst Ergebnisse über 10 cm keine Ausnahme mehr! Nachfolgend finden Sie eine kleine Auswahl der Ergebnisse, die wir von unseren Kunden erhalten haben.

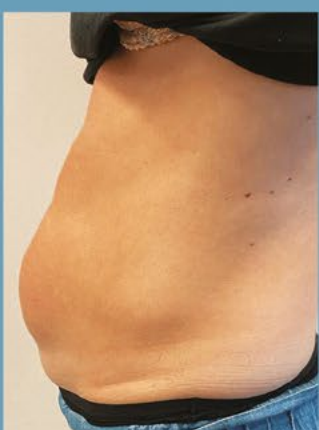

UNSERE BISHERIGEN ERFOLGE!

IN DEN NIEDERLANDEN

- Über 50.000 Menschen behandelt
- Mehr als 60 TC-Device-Standorte
- 40 TC-Clinics-Salons



AKTIV IN

- Die Niederlande
- Deutschland
- Belgien
- Polen
- Litauen

IN EUROPA

- Über 100 Standorte
- Über 200 Geräte platziert



SIND SIE UNSER NÄCHSTER STANDORT?

Gebietsschutz

TCS International gewährt allen seinen Kunden mit einem Wartungsvertrag automatisch Gebietsschutz. Unser Kriterium ist ein Minimum von 40.000 Einwohnern pro Maschine, damit genügend Platz für Ihren aktuellen und zukünftigen Kundenstamm vorhanden ist. Wir möchten an dieser Stelle erwähnen, dass wir keinen Einfluss auf gekaufte Maschinen haben, die in Zukunft eventuell verlagert werden. Sollte dieser Umzug jedoch mit einem Bestandskundenschutz kollidieren, dann entfällt selbstverständlich der Schutz für den Umzugspartner!